

## 新型コロナウイルス感染対策用ガウンについて

(4月20日更新)

新型コロナウイルス感染対策用ガウンを本院内で作成していることが報道されたことにより、国民の皆様からのガウン、マスク、雨合羽の寄附のお申し出が多数ございました。

このことについて、**雨合羽が十分な数に達したため、寄附の受付を中止させていただきます**。皆様からお寄せいただきました温かいご支援に心より御礼申し上げます。

また、ガウンの作成方法および完成画像についてのお問い合わせを多くいただいていますので、各医療機関様向けに、別紙のとおり、本院で使用しているガウンの作成方法と完成写真を公開させていただきます。(使用許諾等は必要ありませんので、どうぞ自由にご利用ください。)

なお、一般の方がこの作成方法を参考にしてガウンを作成し、本院へご寄付いただくことはお控えください。

### 【報道機関の皆様へ】

本院では、新型コロナウイルス対応のため多忙を極めており、また、感染症予防の面からも、現状では、インタビュー取材・写真提供等をお断りさせていただいております。医療崩壊を防ぐ観点からも、本院の医療活動に何卒ご理解のうえ、ご了承ください。

(本ホームページの内容は、報道にご利用いただいて差し支えございません。)

なお、新型コロナウイルス対策につきましては、今後随時、本ホームページにて発表させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。


令和2年4月16日

大阪大学医学部附属病院


# 防護衣(ガウン)の作り方

(規格)  
90L(1000×900×0.04ミリ)


(胴体部)  
1) 90L袋1枚用意

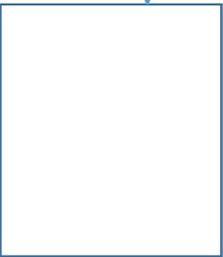


2) 袖部を作成

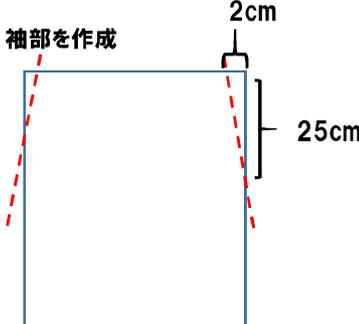

3) 首を通す部分(小さく)

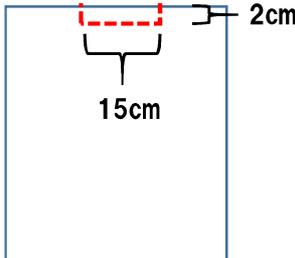

4) 背中に切れ目を入れる

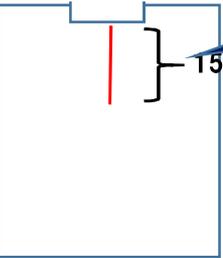


注意! 片面(背中部)のみ切ること。



※着る順番にご注意ください

①袖部を着ます。つなぎ部は背中です。


②頭から胴体部をかぶります。スリット部は背中です。

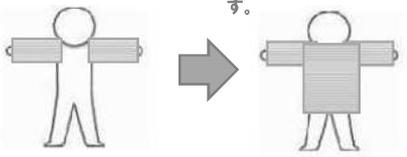


(規格)  
ポリエチレン(PE) チューブ  
厚0.04mm×幅255mm×長500m

(袖部:男性用)

1) 25cm幅の筒状になったロールを用意

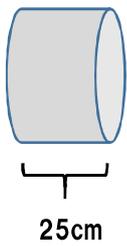


2) ロールを180cmに切断すること

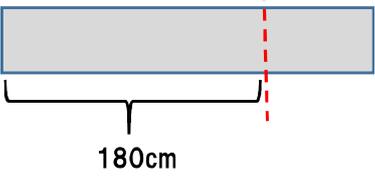


● = 男性用には緑シール

3) 袖を通す部分を作る

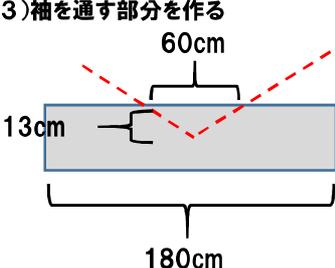


(袖部:女性用)

1) 25cm幅の筒状になったロールを用意

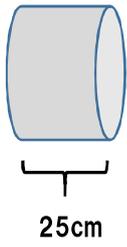


2) ロールを160cmに切断すること

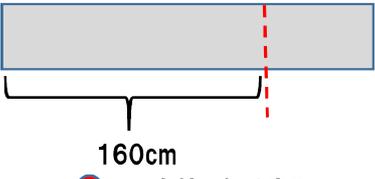

● = 女性用には赤シール

3) 袖を通す部分を作る

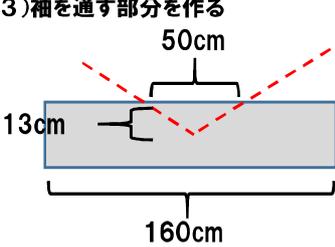

## 医療機関様向け


### ガウン作成方法

材料 90 L の半透明のポリ袋 (1000×900×0.02 又は 0.04mm)

用尺 紐部分 左右紐部分寸法：タテ 75cm×ヨコ 5cm

首を通す部分 上から 25cm、左右 (中央) のところに T 字切り込み  
山あり谷ありの向きは問いません。それほど厳密でなくて構いません。

1. ポリ袋の左右閉じている部分をカットします。
2. カットしたものを開きます。
3. 左右端から 5cm 間隔のところからタテ 75cm までカットします。(紐部分を作ります。)
4. 3. で紐部分を作った逆の方を開きます。
5. 上から 25cm (折り目と一緒のところ) 左右 32cm のところに T 字 (タテ 5cm×ヨコ 26cm) の切り込みを入れて首を通す部分を作ります。

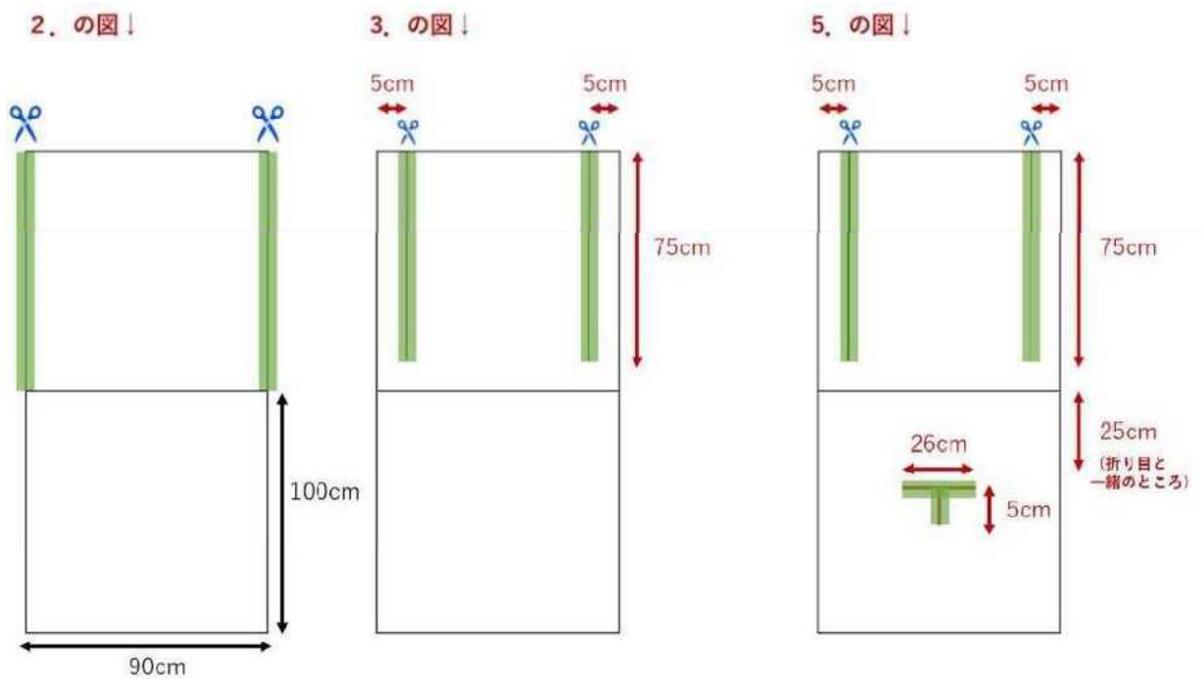

※使用時には、別途アームカバーを装着します。

完成写真

<前>



<後>



<リボン>



※使用時には、別途アームカバーを装着します。